

FAQ

읽어 두면 좋을 사용자 질문과 답변 모음

피닉스가 당신의 비밀병기인 이유

**PHOENIX
FAQ**

미국에서 만든
발기부전 치료기기의 혁신



[알림] 본 문서는 해당 수신인만을 위한 정보이며, 무단 배포 시 법적 책임을 물을 수 있습니다.

PHOENIX?

가정용 체외충격파 치료기
피닉스가 당신의 비밀병기인 이유

세계 최초, 유일
8만명이 구매
100만회 이상 시술
94% 만족
완벽한 게임체인저



실제 사용자와 언론의 찬사!

Forbes MAXIM Men'sHealth Urology Times THE DOCTORS MENS JOURNAL

[알림] 본 문서는 해당 수신인 만을 위한 정보이며, 무단 배포 시 법적 책임을 물을 수 있습니다.

의사가 원하는 피닉스

Q. 피닉스(Phoenix)의 스태프들은들이 이 디바이스를 ‘발기 민주화 (Democratizing Erections)’라고 부른다는데 왜죠?

A. 발기부전에 관한 가장 큰 오해는 “고치기 어렵다”는 편견입니다. 그리고 발기부전에 관한 가장 비밀 아닌 비밀 같은 사실은 “이건 고칠 수 있는 증상입니다. 시간과 돈과 불편함을 기꺼이 부담한다면 말이지요!” ED (발기부전)는 이미 개선이 가능한 증상이지만, 실상을 보면 베버리힐즈와 같은 시간과 돈이 많은 미국 부자들만의 전유물이 되었습니다. 피닉스는 거금을 들이지 않더라도 돈이 많지만 시간을 내기 어려운, 또 불편한 치료 방법을 감수하지 않아도 누구나 이 놀라운 미국 비뇨기과의 첨단 기술과 치유의 효능을 얻을 수 있습니다. 미국에 존재하는 최고의 기술과 효능은 누구나 누릴 권리가 있습니다. 그래서 우리 피닉스를 “발기의 민주화”라고 부른답니다!

Q. 피닉스가 의사들과 만든 병원에서 시행하는 값비싼 치료 방법인 저주파 체외 충격파 (ESWT)의 디바이스란 것은 알겠습니다. 그런데 실제로 의사들과 병원에서 피닉스를 추천하고 권하나요?

A. 그럼요. 피닉스는 미국 최대 남성 건강 클리닉 공급업체인 GAINSwave가 가정에서 남성에게 동일한 치료를 제공하는 것으로 인정한 유일한 기기이며, 수십 년에 걸친 성공적인 치료와 40개 이상의 사례 연구는 이 기술이 효과가 있으며 그 결과가 삶을 변화시킬 수 있다는 것을 증명합니다.

목차

1. 피닉스의 효과 및 도움	5
2. 피닉스 구매 및 주문 지원	9
3. 피닉스 치료 프로토콜 (방법과 주기)	11
4. 피닉스의 합법성	13
5. 피닉스 관련 기타 질문	14

1. 피닉스의 효과 및 도움

Q: 피닉스를 한 눈에 알고 싶어요!

A: 피닉스 홈페이지 (www.getmyphoenix.net) 와 포함된 영상을 보시면 피닉스의 효능과 사용방법 등을 쉽게 이해할 수 있습니다.

Q: 피닉스의 사용가이드는 [30일 주 1~2회 치료 > 그리고 30일 휴식 > 다시 30일 치료 > 마지막 30일 휴식] 으로 총 120일을 가장 최적의 프로토콜(사용가이드)이라고 설명하는데, 효과는 언제 볼 수 있나요?

A: 근육 운동 후 근육이 더 단단하고 두껍게 자라는 시기는, 운동 중이 아니라 운동 후 휴식 기간이란 것 다들 알고 계시지요? 피닉스도 마찬가지입니다. 약 30일의 치료 후 다음 한달 정도를 쉬면, 그 휴식기에 피닉스로 인한 음경의 변화가 이루어 집니다. 어떤 분들은 30일 치료 + 30일 휴식만 끝나도 눈에 띄는 변화를 경험하십니다. 한편, 톰슨 박사와 같은 미국의 최정상급 발기 부전 전문 비뇨기과 의료진과 설계한 프로토콜(사용가이드), 즉 위 30+30 세션을 두번 반복하여 총 120일간 지속한다면, 이미 사용자의 94% 이상 만족한 변화의 기쁨과 효능을 당신이 누리고 있다는 것을 체감하실 수 있습니다.

Q: 피닉스 사용가이드에 따라 120일 치료 이후, 이 치료를 계속 반복하면 더 효과가 좋아지나요?

A: 그럼요. EWST는 먹는 약이나 발기약물을 음경에 직접 주사하는 것과 같은 일시적 효과를 위한 부스터가 아닙니다. 한번 근육이 커지고 근력이 생기면 그 상태가 상당히 지속되는 것과 같은 근본적인 개선을 이룹니다. 하지만 휴식기도 매우 중요합니다. 휴식이 곧 회복이고 회복이 효능과 결과를 만드니까요. 그러니 1년 내내 계속 하실 필요는 없습니다. 보통 6~12개월 주기로, 1년에 1~2회 정도 반복하시면 좋습니다. 하지만 꼭 기억하세요. 근육 운동도 적절한 휴식 및 영양 보충과 건강한 생활 습관을 유지할 때 최적의 향상을 이룹니다. 성적 건강도 마찬가지입니다. 건강한 생활 습관은 피닉스를 통한 효능을 극대화 할 수 있습니다.

Q: 저는 음경의 진공 펌핑 기구를 현재 사용하고 있습니다. 피닉스와 함께 사용해도 되나요?

A: 어떤 남성은 음경에 진공 펌핑을 하는 디바이스를 사용하고 있기도 합니다. 피닉스는 진공 펌프 없이, 피닉스의 ESWT 충격파만으로도 충분하고 놀라운 변화를 이끌어 냅니다. 하지만 진공 펌핑 기구와 병행 사용 하여도 무방하며, 진공 펌핑을 병행 할 경우 효과가 더 좋아진다는 사례도 있었습니다.

Q: EWST가 발기 부전을 개선하는 원리는 무엇인지 궁금합니다.

A: EWST의 발기부전에 작용하는 원리와 효과는 지난 20여년간 미국은 물론 전세계 대부분 국가의 비뇨기와 치료를 통해서 검증이 되었습니다. 음파 충격 치료의 목적도 아주 간단하고 명확합니다. 바로 음경의 혈류를 증가시키는 것입니다. 고도로 설계된 '음파'의 충격을 음경 내부 타겟 지점에 가하여, 혈관에 미세한 손상을 일으키면 휴식기 동안 새로운 혈관들이 자라나며 혈류량을 증가시키고, 음경 해면체라는 성기의 주머니에 혈류량 유입이 원활해지며, 단단하고 오래가는 것입니다. 전세계에서 유일하게 병원과 동일한 EWST 단말기인 피닉스의 혁신은, 이 과학과 효능을 집에서도 쓸 수 있는 스마트 디바이스로 만들었다는 점입니다.

Q: 피닉스가 발기부전을 치료한다는 의미는 무엇인가요?

A: 발기부전은 매우 다양한 신체적 심리적 원인으로 인한 결과입니다. 따라서 우리는 피닉스의 ESWT(저강도 체외 충격파)만으로 발기부전을 '치료'한다는 의학적 주장을 하거나, 또는 무조건 효과가 있다는 보장을 하지는 않습니다. 다만, 우리는 몇가지 사실을 확인합니다.

첫째, 피닉스의 ESWT (저강도 체외 충격파)는 음경 해면체 내의 혈류량을 늘리는데 근본적이고 매우 효과적인 도움을 주는 지난 20년간 의학계와 병원에서 검증된 과학이자 치료법이며, 둘째, 이 ESWT를 홈케어용으로 제작하여 세계에서 유일하게 FDA에 등록된 디바이스가 바로 피닉스이며, 셋째, 피닉스가 발기 부전으로 고민하는 8만명 이상의 남성들에게 100만회 이상 치료되며 94%가 만족 했다는 사실을 말씀 드립니다.

본 답변을 포함한 모든 콘텐츠에서는 별도의 고지가 없더라도, 피닉스가 어떤 의학적 주장을 하거나 결과를 보장 하지는 않는다는 점을 유념해 주시면 감사하겠습니다.

Q: 교환 및 반품은 어떻게 처리할 수 있는지 궁금합니다.

A: 구매 후 배송 완료일로부터 7일 이내에 사용하기 전 제품 하자가 있거나, 또는 개봉을 하지않고 사용하기 전에는 교환 및 반품이 가능하나 고객 단순 반품의 경우 왕복 택배비(부대비용 포함)가 부과 될 수 있음을 알려드립니다.

Q: 피닉스가 신경 문제, 오르가즘 민감성 또는 침습적 시술(예: 근치적 전립선 절제술 또는 전립선암 치료)로 인한 발기부전증에도 도움이 될 수 있을까요?

A: 전립선을 제거하는 수술의 경우, 과거에는 일부 신경을 제거하기도 했습니다. 수술 중 신경이 손상될 가능성은 여전히 있지만 최근 미국의 비뇨기와 수술에서는 신경을 보존하기 위해 모든 노력을 기울입니다. 시술 중에 신경이 제거되거나 상처가 나거나 늘어나거나 손상되면 평활근이 활성화되지 않고 위축되기 시작하여 중장기적으로 음경 조직이 손상될 수 있습니다. 즉, 이것은 신체의 중요한 연결에 해를 끼쳐 평활근의 이완(음경에 혈액을 공급하는 생리적 반응)을 유발합니다. 적절한 음경 기능을 지원하려면 평활근 세포를 복원해야 합니다.

피닉스 디바이스로 전립선 제거 후유증을 치료하는 직접적인 연구는 되어 있지 않습니다. 투명하고 정확한 답변을 드리고자 하는 저희의 정책 상, 피닉스가 이에 도움이 될 것이란 확정적인 답변을 드리지는 않습니다.

대부분의 비뇨기과 경우를 참고로 말씀드리면, 체외 충격파 시술을 포함한 다양한 치료가 도움이 될 수 있지만 시술 후 1년 이내에 시행하는 것이 가장 효과적입니다. 그리고 일반적으로 시술 전에 발기가 가능했던 남성은 음파 치료를 통해 발기력을 되찾을 수 있습니다. 다시 말하지만, 타이밍이 중요한 요소입니다. 이 과정에서 혈류량 증가는 중요한 치료 요소이며 체외충격파가 매우 긍정적인 핵심 역할을 담당하는 치료 방법 중의 하나로 알려져 있습니다.

Q: 피닉스가 전립선 비대증에 도움이 될 수 있을까요?

A: 피닉스가 전립선 비대증에 어떤 도움을 주는지에 관한 직접적인 의학적 연구나 임상은 되어 있지 않아서 확실적인 견해를 공식적으로 드릴 수는 없습니다. 다만 참고하실 사항은 피닉스는 음경으로 가는 혈류를 개선하는 데 도움이 되도록 설계되었다는 점입니다. 혈류 문제로 인해 전립선 비대증이 발생한 경우 체외충격파가 예방과 개선에 도움이 되는 경우가 많다고 알려져 있습니다. 하지만 전립선 비대증에는 다양한 원인이 있을 수 있기 때문에 가장 좋은 방법은 직접 의사와 상담하는 것입니다. 의사는 환자의 구체적인 상황을 잘 알고 있고 피닉스와 같은 음파 치료가 전립선 비대증에 도움이 될지 여부에 대해 더 잘 조언해 줄 수 있기 때문입니다.

Q: 음경의 감각이 무감각해지거나 상실된 경우 피닉스가 도움이 될 수 있을까요?

A: 신경의 물리적 자극은 발기에 중요한 부분입니다. 음파 치료는 혈관 생성과 신경 생성을 모두 유발합니다. 건강한 조직이 회복되면 신경 종말이 다시 활성화되고 새로운 혈관이 성장합니다. 무감각은 여러 가지 의학적 문제나 원인이 있을 수 있으므로 주치의와 함께 검진을 예약하여 건강 상태를 꾸준히 관리하는 것을 추천합니다.

Q: 고혈압이 있는 경우에도 피닉스가 효과가 있나요?

A: 일반적으로 고혈압이 있는 사람은 기존의 특히 작은 미세 혈관들이 찢어지거나 부하를 많이 받게 됩니다. 체외 충격파 치료는 남성의 음경에 새로운 혈관을 성장시키는 데 도움이 될 수 있는 점은 잘 알려져 있지만, 한편 고혈압은 이를 관리하지 않고 방치하면 이러한 새로운 혈관의 기능이 저하되어 음파 치료의 이점이 없어집니다. 의사와 협력하여 혈압을 정상적이고 안전한 범위로 조절하는 것이 중요하며, 그런 관리 하에 피닉스가 도움이 될 수 있을 것입니다.

Q: 만약 혈압약을 복용 중인 경우 피닉스 치료는 어떻게 하는게 좋을까요?

A: 대부분의 혈압약과 피닉스가 어떤 상충이나 부작용을 일으키지 않으나, 베타차단제 종류의 혈압약을 복용할 경우 피닉스나 체외음파충격은 효과가 없습니다. 베타 차단제는 이름이 주로 "-olol"로 끝나는 약물을 설명하는 용어로, 심박수와 리듬을 통해 혈압을 조절하는 약물입니다. 고혈압 뿐만 아니라 협심증, 심부전 및 심근경색 후 유증에도 사용됩니다. 이 계열의 약물은 베타 수용체를 차단하기 때문에 발기부전에는 가장 나쁜 약물 중 하나로 알려져 있습니다.

부교감 신경계는 혈관 확장을 일으켜 혈액이 음경으로 흐르게 하고 베타 수용체와 결합하여 이를 수행합니다. 이 름에서 알 수 있듯이 베타 수용체를 차단하면 정상적인 부교감 신경의 입력이 차단되어 발기 부전을 유발할 수 있 습니다. 가장 먼저 의사와 상의하여 베타 차단제를 복용 중인지 확인해야 합니다. 만약 베타 차단제를 복용 중이 라면 피닉스는 큰 도움이 되지 않습니다.

Q: 당뇨병이 있는 경우에 피닉스가 도움이 될 수 있을까요?

A: 피닉스와 당뇨 환자 사이의 관련성에 관한 직접적 의학적 연구나 임상 통계는 없습니다.

체외충격파에 관한 일반적인 여러 논문과 실 사례를 보면, 당뇨병을 관리하기 위해 의사의 치료 계획을 따르고 있 고 A1C가 7% 미만인 남성 당뇨병 환자라면 음파 치료의 혜택을 받을 가능성이 매우 높은 것으로 알려져 있습니 다. 만약 당뇨병이 조절되지 않거나 제대로 관리되지 않는 성인 남성(헤모글로빈 A1C 7% 이상)의 경우, 혈중 당 분으로 인해 음경의 혈관과 신경을 비롯한 신체 여러 부위에 심각한 손상을 입을 수도 있게 됩니다. 당뇨병은 여 러 원인과 다양한 상태로 발현됨으로, 꼭 담당 의사와 상의하시기 바랍니다.

Q: 불안, 우울증 또는 기타 심리적 요인으로 인한 발기부전이 있는 경우 피닉스가 도움이 될 수 있을까요?

A: 저희는 직접 의학적 결론을 단정하지는 않습니다. 다만, 신체적인 불안감으로 인한 심리적 영향을 받는 발기 부전의 경우라면, 체외충격파를 통한 신체적 개선도 심리적 영향을 줄 것으로 예상 될 수 있습니다. 다만 심리적 요인은 매우 복잡하고 다양한 원인이 있을 수 있기 때문에, 이의 개선을 위해서 꼭 전문가의 도움을 받을 것을 권 장드립니다.

Q: 저는 매우 고령의 나이입니다. 피닉스가 저를 도와줄 수 있을까요?

A: 모든 연령대의 남성은 음파 치료에 반응할 수 있습니다. 테스토스테론은 강력한 혈관 확장제인 산화질소의 방 출을 촉진하는 물질인데, 70세 이상 남성의 경우 테스토스테론 수치가 매우 낮은 경우에는 개선의 가능성이 낮 아질 수도 있습니다.

Q: 피닉스로 인해 발기가 지속적으로 또는 제가 원하는 것보다 더 오래 발기가 유지될 수도 있을까요?

A: 피닉스나 심지어 병원의 어떠한 발기부전 치료도, 갑자기 당신을 10~20대 호르몬과 피가 들끓는 열혈 청년 의 상태로 되돌리는 것은 어렵다는 점을 아실 겁니다. 저희는 피닉스가 당신을 10~20대의 혈기 왕성한 상태로 만들어 드리기는 쉽지 않다고 정직하게 말씀드립니다. 다만 혈류를 원래대로 회복시켜 여러분이 다시 활력을 되 찾을 수 있도록 근본적인 개선을 이루는 체외충격파를 방출한 다는 점을 강조 드릴 수 있습니다.

2. 피닉스 구매 및 주문 지원

Q: 이미 주문한 상품에 대해 질문 및 배송 진행을 확인하고 싶습니다.

A: 이미 주문한 상태에서 해당 내용에 관한 확인은 해외배송으로 주문하신 사이트에서 확인 및 문의가 가능합니다. (결재하신 네이버 스마트스토어 구매대행 사이트에서 확인가능.)

Q: 배송물의 무게와 치수는 어떻게 되나요?

A: 피닉스 키트 1개만 포함된 배송물의 크기는 약 14"X11"X6이며 무게는 약 1.72kg입니다.

Q: 판매자와 직접 문의와 상담을 하고 싶습니다.

A: 현재는 48시간 내 답변이 가능한 이메일로만 문의와 상담을 받고 있습니다. 아래 이메일 주소로 문의와 상담 글을 남겨 주시면 됩니다.

48시간내 상담 문의 : phoenix@artofdiagnosis.com

Q: 피닉스를 직접 오프라인에서 구매 및 수령할 수 있을까요?

A: 현재 피닉스는 해외 직배송을 통해서만 구매 및 수령을 할 수 있습니다.

Q: 피닉스를 구매할 경우 배송비와 관세는 무료인가요?

A: 현재 제품의 모든 배송비와 관세는 최종 구매가에 포함되어 있으며 별도로 지불하지 않아도 됩니다.

Q: 송장 번호를 조회하니 피닉스 디바이스가 배송 완료되었다고 표시되었지만 디바이스를 받지 못했습니다. 이럴 경우 어떻게 조치할 수 있을까요?

A: 먼저 배송 주소지와 실제 수령지를 확인하여, 올바른 주소로 배송 되었는지 확인합니다. 만약 주소가 일치하면, 구매하신 사이트의 상담처로 문의를 남겨주세요. 대부분의 경우 영업일 기준 7~10일이 소요되지만 고객님의 응답하지 않을 경우에 배송 관련 확인이 연장될 수 있습니다. 만약 배송을 하는 곳의 실수로 배송이 제대로 이루어지지 않다고 판단될 경우, 즉시 대체품을 보내드립니다.

Q: 현재 피닉스는 어디에서 만들어지고 배송되나요?

A: 많이들 쓰시고 계신 애플 제품과 마찬가지로 피닉스는 캘리포니아에서 설계되고 중국에서 제조되었습니다. 그리고 피닉스 본사의 엄격한 품질 관리 기준에 따른 검품 과정을 거쳐 고객에게 인도 됩니다. 한국의 경우 구매 사이트에서 접수된 주문은 미국 캘리포니아 LA의 주문 처리 팀에서 배송합니다.

Q: 주문을 완료한 고객이 배송 주소를 변경하고자 할 때 어떻게 해야 하나요?

A: 주문 세부정보와 원하는 주소로 이미 주문이 배송된 경우에는 일단 해당 주소지로 어쩔 수 없이 배송이 됩니다. 송장 정보를 추적하여 고객이 운송사와 직접 연락하여 배송 주소 변경을 요청할 수 있지만, 당사는 이를 통제하거나 책임지기 어렵다는 점 이해 부탁드립니다.

Q: 피닉스를 전화로 주문할 수 있나요?

정확한 주문 정보 관리를 위해서 전화 주문은 받지 않습니다. 주문은 해외직배송사이트의 온라인 주문 방법으로만 가능합니다.

Q: 피닉스의 상자가 배송 중에 손상되어 배송된 것 같습니다. 이 경우 어떻게 처리되나요?

A: 먼저 고객을 통해 피닉스 자체에 손상이 없고 정상적으로 작동하는지 확인 후 피닉스 자체에 손상이 없을 경우, 고객이 원한다면 새 상자를 배송해 드릴 수 있습니다. 만약 디바이스 자체가 손상된 경우 무상으로 맞교환을 진행해드리고 있습니다. 이 경우 배송으로 인한 파손을 확인하기 위해 배송된 상태의 사진만 구매하신 쪽으로 보내주시면 됩니다. 절차가 완료되면(기본적으로 당사 측에서 피해 사진과 함께 몇 가지 서류 작업이 필요함) 반품 라벨과 교체용 피닉스를 보내드립니다.

3. 피닉스 치료 프로토콜(방법과 주기)

Q: 피닉스의 치료 방법과 주기, 즉 치료 프로토콜은 무엇입니까?

A: 30일 동안 일주일에 1~2회 치료를 권장합니다. 한번 치료 후에는 그 다음 치료까지 최소 36시간 이상의 간격을 두어야 합니다. 그래서 피닉스는 한번 치료를 완료하면 과치료로 인한 만일의 부작용이나 불편함을 예방하기 위해 36시간 동안은 작동하지 않습니다. 30일간 주 1~2회 치료 후 30일간 휴식을 취합니다. 이 시기가 바로 새로운 혈관의 성장이 끝나고 치료 주기 보다는 실질적인 개선이 이루어지는 회복기이자 성장기입니다. 어떤 분들은 이 첫번째 휴식 회복기, 약 5주 정도 후에 개선된 변화를 감지합니다. 휴식 후 30일 동안 주당 2회씩 한 주기를 더 완료할 수 있습니다. 이렇게 [30일 주2회 치료] + [30일 휴식 회복] + [30일 2회 치료] + [30일 회복 휴식] = 총 120일을 지나면 대부분의 남성들은 눈에 띄는 변화를 몸소 느끼며 확인하게 됩니다! 축하합니다! 당신은 믿을 수 있는 과학적인 방법을 선택하여 노력한 결과를 얻으셨습니다!

Q: 120일 치료 후 계속 치료를 하나요? 어떤 주기로 치료를 반복하며 지속하는 것이 좋나요?

A: 체외충격파로 인한 효과는 근육 운동처럼, 너무 과하지 않게, 지속적으로, 그리고 다른 건강한 생활 습관을 병행하면 그 효과가 훨씬 좋습니다. 위의 [30일 주 1~2회] + [30일 휴식 회복]의 주기는 원하는 횟수만큼 반복할 수 있습니다. 원하는 결과에 도달하면 6~12개월마다 치료를 반복하면서 진전된 상태를 유지할 수 있습니다.

Q: 치료를 완료할 때 발기 상태여야 하나요? 혹시 수축 링을 사용할 수 있나요?

A: 치료 중 발기 상태인지 이완 상태인지는 중요하지 않습니다. 수축 링은 의사가 권장하는 치료 프로토콜의 일부가 아니므로 사용을 권장하지 않으며 그 결과에 책임지지 않습니다.

Q: 피닉스 치료 후 성기에 정맥이 늘어난 것을 발견했습니다. 그래도 괜찮나요?

A: 네, 실제로 정말 좋은 신호입니다. 더 많은 혈류가 발생하고 있다는 뜻입니다.

Q: 피닉스는 방사형 파동과 집중파 중 피닉스는 어떤 것을 방출하나요?

피닉스는 방사형 충격파와 집중 충격파를 모두 방출합니다. 이 독특한 기능은 특허 출원 하였습니다. 방사형과 집중형은 말그대로 음파 충격이 어떤 각도와 지점으로 퍼지는지를 의미합니다. 일반적으로 체외충격파에서

피부 밑 음경 해면체 주위를 파고들어 충격을 가하는 집중형이 더 진보된 기술로 인식되고 있으나, 넓게 퍼지는 방사형 충격 파동도 효능에 의미 있는 도움을 준다고 우리는 생각되고 있습니다.

Q: 피닉스를 사용할 때 얼마나 세게 눌러야 하나요?

A: 음경과 피닉스 사이에 틈이 없도록 지긋이 눌러 접촉 상태를 유지하면 됩니다. 단단히 눌러 밀착시키되 통증이 느껴지지 않을 정도로만 누르세요.

Q: 마사지건과 같은 '진동 충격파'와 '음파 충격파' 치료는 다른 의미인가요?

A: 많은 사람이 '진동 충격파'와 '음파 충격파'를 혼용하여 사용하지만 엄밀히 다르며, 비뇨기과의 발기부전용 Li-ESWT (저강도 체외 충격파)는 음파 충격파를 의미합니다.


또한 마사지건이나 롤러와 같은 진동이나 지압의 충격과 음파 충격도 원리와 작동하는 매커니즘과 효능이 다릅니다. 물론 전기를 흐르게 만드는 전기 충격과도 매우 다릅니다. '음파 충격파' 치료는 음파가 음속을 초과하는 속도로 이동하는 특정 유형의 음파를 말합니다. 초음속 제트기가 머리 위를 지나갈 때 발생하는 '소닉 붐'과 같이 음파가 이동하는 매질에는 '폭발' 효과가 생깁니다. 이렇게 단순한 진동이 아닌 고도로 제어된 소리 파동의 폭발 효과는 플라그를 분해하고 미세 외상을 유발하여 새로운 혈관의 성장을 촉진하는 등 음파 치료의 많은 이점을 제공하는 것으로 밝혀졌습니다. 공식 명칭은 Li-ESWT (저강도-체외충격파치료)로 부르며, 줄여서 '음파 충격 치료'라고도 합니다.

Q: 음경만곡증 (페이로니병)이 있는 경우에도 사용이 가능한가요?

A: 페이로니병의 경우 혈류량을 증가시키는 체외충격파 기술이 비뇨기과에서 보조적으로 유용하게 사용되는 것이 일반적입니다. 그러나 개인차가 있을 수 있으므로 병원의 진단과 조언에 따라 사용 여부를 결정하시기 바랍니다.

Q: 왜 음경의 아래 6시 방향에는 피해야 하나요?

A: 음경 아래 6시 방향에는 요도가 피부와 가까운 깊이에서 지나갑니다. 따라서 6시 방향에서 피닉스를 사용할 경우 피닉스의 음파 충격이 요도에 가깝게 전달됩니다. 이 경우 혹시 있을 수 있는 요도의 손상을 방지하기 위해 요도를 따르는 6시 방향에서는 사용을 하지 말아 주십시오. 또한 효과적 측면에서도 6시 방향을 제외한 나머지 방향만으로도 음경 내 발기를 담당하는 해면체에 충분히 필요한 수준의 충격파를 도달 시킬 수 있습니다. *Urethra = 요도

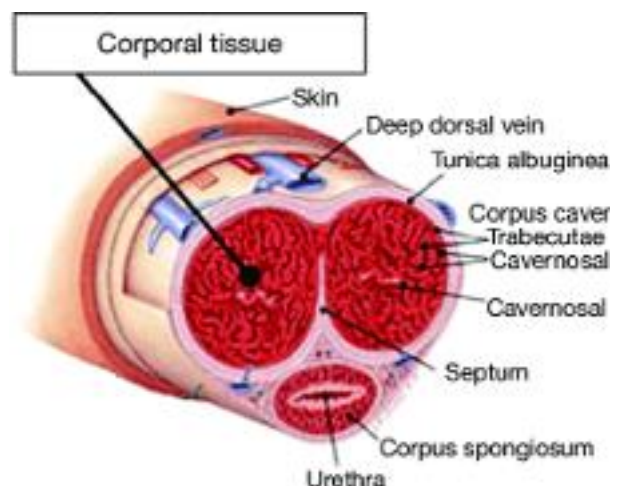

4. 피닉스의 합법성

Q : The Phoenix의 FDA 등록 번호는 무엇인가요?

A : 당사의 510(k) 등록 번호는 '3016003274'입니다. 등록된 'Moon Pool'은 관련 회사이지만 'Launch Medical'과 'The Phoenix'라는 이름으로 마케팅하고 있습니다.

Q : The Phoenix의 미국 특허 번호는 무엇인가요?

A : 미국 특허 번호는 '10653581' 입니다.

Q : 피닉스는 UL에 등재되어 있나요?

A : 당사의 피닉스 장치는 저전압 직류 장치입니다. UL은 고전압 교류에 적용됩니다. 별도로 전원 공급 장치는 UL에 등재되어 있습니다.

Q : 피닉스는 Li-ESWT 기기인가요?

A : 네, 피닉스는 집속 및 방사형 충격파(강력한 음파)를 모두 전달합니다. 스마트 가이드 기술이 적용된 최초의 가정용 Li-ESWT 기기로, 누구나 자신의 방식대로 시간과 장소의 구애 없이 치료할 수 있도록 도와줍니다.

5. 피닉스 관련 기타 질문

Q: 피닉스는 최대 몇 번까지 사용이 가능한가요?

A: 최상의 결과를 얻으려면 1,000,000회의 음파 생성, 대략 약 70회 치료 도달한 후 기기를 교체할 것을 권장합니다. 하지만 70회를 상회하더라도 물리적 음파 생성은 디바이스가 작동하는 한 가능하며, 다만 70회 이후의 음파는 다소 불균형하거나 약화될 가능성도 있음을 알려드립니다.

Q: 피닉스는 어떻게 음파를 생성하나요?

A: 피닉스는 금속 슬러그가 노즐팁(금속팁)에 반복적으로 부딪히면서 음파를 발생시킵니다. 이 모든 과정은 내부에서 일어나며, 접촉하는 동안 보정된 파동이 팁에서 피부를 통해 살 속으로 파고듭니다.

Q: 해외 전압 (220V)에서도 작동하나요?

A: 이 장치는 24볼트 DC(직류)로 작동하며 1암페어 미만의 전력을 소비하며 220V와 호환됩니다. 다만 플러그는 해당 국가의 컨버터(예: 유럽형 등)에 소켓을 끼워 사용합니다.

Q: 피닉스를 어떻게 청소해야 하나요?

A: 디바이스의 팁만 소독 솜이나 소독 알코올 또는 세제나 물로 청소하고 잘 말려주면 됩니다. 다만, 전자 기계 장치가 있는 윗부분을 분리하거나 젖지 않도록 주의하세요.

Q: 피닉스를 충전해서 사용하는 기능도 있나요?

A: Phoenix에는 충전식 배터리가 포함되어 있지 않으므로 충전할 필요가 없습니다. 피닉스는 반드시 전원이 연결되어 있어야 작동하므로 피닉스가 연결되어 있는 동안에만 치료를 수행할 수 있습니다.

Q: 피닉스에 검은 먼지나 금속 입자가 미세하게 생기거나 쌓이는데 괜찮은가요?

A: 이것은 완전히 정상입니다. 피닉스는 서로 매우 밀접하게 접촉하여 움직이는 여러 내부 구성 요소를 가지고 있습니다. 처음 몇 번의 치료 중에는 부품이 서로 더 잘 맞도록 약간 마모되면서 먼지/잔여물이 더 많이 생길 수 있습니다. 이러한 침입 과정과 지속적인 마찰 때문에 1,000,000회 음파 생성(약 70회 치료) 후 교체할 것을 권장하는 이유 중 하나입니다.

Q: 피닉스의 전원을 키고 작동하기까지 몇 초가 걸리는데 정상인가요?

A: 네, 연구실에서는 일부 경우 피닉스의 전원을 수초간 완전히 연결해야만 전원이 켜지도록 되어 있습니다.

Q: 피닉스는 작동 소리가 얼마나 시끄러운가요?

A: 피닉스 홈페이지(www.getmyphoenix.net)내 삽입된 동영상은 피닉스가 내는 소리에 대한 심층적인 개요를 제공합니다. 보다 정확한 답변을 원하시는 고객을 위해 피닉스의 음량은 88데시벨입니다. 추가로 피닉스는 15k~19kHz(헤르츠)에서 작동합니다. 즉, 피닉스는 초당 15~19회의 펄스를 생성합니다.